

Gebruiksaanwijzing CT-PRO:

1. De CT-PRO zonder pompje en slang voor gebruik ongeveer 2-3 uur in de diepvries of ijsvak van de koelkast leggen. Het verdient aanbeveling uit oogpunt van hygiëne de CT-PRO in de meegeleverde plasticzak te laten.
2. Voor het gebruik het pompsysteem aan het 'on/off' ventiel aansluiten.
3. Het blauwe koelkussen om de te behandelen plek aanleggen en met de klittenband fixeren.
4. Bij het ventielinstelling 'on' kan lucht in de CT-PRO gepompt worden. Als de compressedruk te hoog is, kunt u de lucht uitlaatknop van de pomp bedienen.
5. Bij de ventielinstelling 'off' kan de luchtslang verwijderd worden.
6. Na gebruik de lucht uit de CT-PRO laten stromen (ventielinstelling op 'on'), het product reinigen en in de meegeleverde plasticzak verpakken voor de volgende behandeling.

BELANGRIJK: Bij overgevoeligheid voor koude een doek gebruiken tussen de huis en de binnenkant van de CT-PRO. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot uw behandeld arts of therapeut.